

# Odinell

## Higiena sluhovoda

Odinell je izotonična raztopina za izpiranje, obogatena z neagresivnimi površinsko aktivnimi snovmi, ki pripomorejo k odstranitvi ostankov ušesnega masla.

**Redna uporaba Odinell spreja preprečuje nastajanje cerumna v kosih.**

### Indikacije:

- Za ljudi, ki uporabljajo slušne aparate.
- Za ljudi s prekomernim izločanjem ušesnega masla.
- Za ljudi, ki so izpostavljeni prašnemu okolju.

### Sestavine:

Preciščena voda, NaCl, pidolat betain, polisorbit 80, rastlinski glicerol, Matricaria Chamomilla, klorfenezin, polimer propil bigvanida.

### Smernice za uporabo:

1-2 pritiska na sprej, 2-3 krat na teden.

### Navodila za uporabo:

- 1-Pritisnite za sekundo, ko je konica tik ob vhodu v sluhovod.
- 2-Nagnite glavo, da omogočite iztok tekočine in vseh ostankov ušesnega masla.
- 3-Ponovite, če je to potrebno in obrišite s čisto, mehko krpo.
- 4-Po vsaki uporabi konico očistite s toplo vodo.

### Ne uporabljajte:

- V primeru vnetij, perforacije bobniča, vstavljenih timpanalnih cevok v sluhovodu.
- Pri otrocih mlajših od 30 mesecev.
- Po operaciji ušes. V primeru bolečine v ušesu se posvetujte z zdravnikom.

### Opozorilo:

Za zunanjo uporabo. Posoda je pod tlakom. Zaščitite pred sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Ne prebodite ali sežigajte, tudi ko je vsebina izpraznjena. Hraniti izven dosega otrok. Ne uporabljajte po preteku roka trajanja.



0120

**AUDIOBM**  
SLUŠNI APARATI

[www.audiobm.si](http://www.audiobm.si)

 MG Développement  
ZA aéroport de Montpellier  
34470 Pérols - FRANCE