

Navodila za uporabo polnilnega podstavka



unitron. Hearing matters

A Sonova brand

Hvala

Hvala, ker ste izbrali to rešitev za polnjenje baterij.

V našem podjetju si močno prizadevamo pomagati ljudem z okvaro sluha. Tesno sodelujemo s strokovnjaki za sluh in izdelujemo napredne rešitve, ki so dostopne vsem. Ker je sluh pomemben.

Ta navodila veljajo za naslednje modele:

Leto uvedbe: 2017

Komplet za ponovno polnjenje - Moxi Fit R

Za uporabo z modeli slušnih aparatov:

N Moxi Fit Pro

T Moxi Fit Pro

N Moxi Fit 800

T Moxi Fit 800

N Moxi Fit 700

T Moxi Fit 700

N Moxi Fit 600

T Moxi Fit 600

N Moxi Fit 500

T Moxi Fit 500

Komplet za ponovno polnjenje - Stride M R

Za uporabo z modeli slušnih aparatov:

N Stride M Pro

T Stride M Pro

N Stride M 800

T Stride M 800

N Stride M 700

T Stride M 700

N Stride M 600

T Stride M 600

N Stride M 500

T Stride M 500

Vaš polnilni podstavek

Slušni akustik: _____

Telefon: _____

Serijska številka: _____

Garancija: _____

Datum nakupa: _____


Polnilni podstavek tip:

Moxi Fit R

Stride M R

Hitri referenčni vodnik

- 1 **Polnilni podstavek** – polni slušna aparata, medtem ko jih ne uporabljate
- 2 **Signalni lučki** – utripajoči zeleni lučki označujeta, da se slušna aparata polnita. Če zeleni lučki svetita neprekinjeno, to označuje, da sta slušna aparata napolnjena
- 3 **Polnilni reži** – vstavite slušna aparata v polnilni reži, tako da sta kupoli obeh slušnih aparatov obrnjeni proti isti strani polnilnega podstavka kot napajalni kabel
- 4 **Napajalni kabel** – priklopi se na hišni adapter USB in nato v električno vtičnico

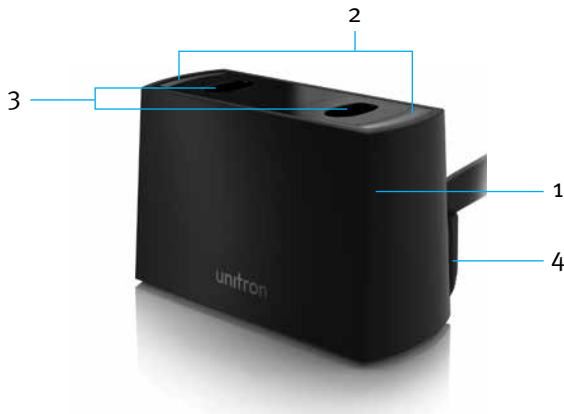

Kazalo

Opozorila.....	2
Navodila za uporabo.....	4
Skrb za polnilni podstavek	6
Vodnik za odpravljanje težav	8
Tehnični podatki.....	9
Informacije o simbolih in njihova razlaga.....	10
Dodatne opombe	12

Opozorila

- ⚠ Majhni deli pomenijo nevarnost zadužitve. Slušne pripomočke, baterije in dodatke hranite nedosegljive otrokom in domačim živalim.
- ⚠ Dolgi napajalni kabel ne sme biti nameščen na prehodu, kjer bi se obenj lahko kdo spotaknil.
- ⚠ Polnilnik vsebuje magnetne in mora biti od srčnih spodbujevalnikov oddaljen najmanj 15 cm.
- ⚠ Vsebuje dolg napajalni kabel, ki lahko ob nepravilni uporabi povzroči zadužitev.
- ⚠ Ne držite napajalnega kabla, medtem ko sukate polnilnik.
- ⚠ Nevarnost električnega udara skozi nezdružljive dele. Uporabljajte hišni adapter USB, ki ste ga dobili s polnilnikom. Polnilno enoto sme servisirati samo pooblaščen osebje.
- ⚠ Ne uporabljajte v eksplozivnem ali s kisikom obogatenem okolju.
- ⚠ Če se magneti ločijo od polnilnika, jih ne dajte v nos ali usta. Zaužiti magneti se lahko prilepijo na črevesje in povzročijo hudo poškodbo ali smrt. Če pogoltnete ali vdihnete magnetne, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- ⚠ Uporabljajte samo polnilnik, ki ga je odobril Unitron. V navodilih navajamo nazivne električne lastnosti (tj. IEC60950 in IEC60065 z minimalno nazivno izhodno močjo 5 V DC in 0,5 A ali 500 mA).
- ⚠ Pred polnjenjem poskrbite, da bosta slušna aparata suha in čista.
- ⚠ Ta polnilnik je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- ⚠ Naprave ne izpostavljajte skrajnim temperaturam ali visoki vlažnosti.
- ⚠ Ne pustite je na neposredni sončni svetlobi.
- ⚠ Ne potaplajte je v vodo.
- ⚠ Naprave ne postavljajte v mikrovalovno pečico.
- ⚠ Pred polnjenjem poskrbite, da bo slušni aparat suh.


Navodila za uporabo

Ta polnilni podstavek je namenjen polnjenju slušnih aparatov z akumulatorskimi baterijami. Uporabljajte samo akumulatorske baterije srebro-cink (AgZn). Ta izdelek nima stikala za vklop. Vklopi se ob priključitvi napajalnega kabla.


Najprej vtaknite napajalni kabel v hišni adapter USB in vtičnico. Ko prvič priključite kabel, obe polnilni lučki na kratko zasvetita zeleno.

Polnjenje slušnih aparatov

1. Rahlo primite slušna aparata za ohišje in ju postavite v polnilno režo. Obe kupoli morata biti obrnjeni proti isti strani polnilnika kot napajalni kabel, kot je prikazano na sliki. Ko sta slušna aparata pravilno nameščena, začneta obe lučki utripati zeleno.

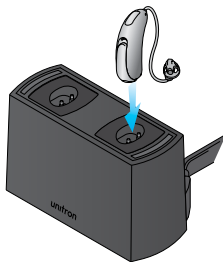

2. Kadar zeleni lučki utripata, se slušna aparata polnita. Ko lučki prenehata utripati in neprekinjeno svetita zeleno, sta slušna aparata povsem napolnjena. To traja približno 5–7 ur.

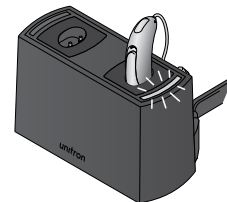

3. Slušna aparata lahko odstranite, preden sta popolnoma napolnjena, vendar baterija ne bo trajala tako dolgo kot po popolnem polnjenju. Najbolje je, če pustite slušna aparata v polnilniku, kadarkoli ju ne uporabljate. Ne bosta se preveč napolnila.

Skrb za polnilni podstavek

Ob pravilni uporabi bo življenjska doba baterije daljša.

Nasveti glede polnjenja

- Redno polnite slušne aparate, preden jih uporabite.
- Slušne aparate polnite pri temperaturi med 10 in 40 °C.
- Slušnih aparatov ne postavljajte v polnilni podstavek, če ta ni priključen; v tem primeru se bodo baterije izpraznile.
- Če slušnih aparatov nekaj dni ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Baterija bi morala trajati približno eno leto.

Vaš slušni akustik jo bo zlahka zamenjal.

Čiščenje

- Odstranite umazanijo s suho in mehko krpo.
- Z mehko krtačko, ki je priložena slušnim aparatom, lahko očistite stike na polnilniku.
- Polnilnika ne sterilizirajte ali razkužujte.
- Ne čistite ga z alkoholom, topili ali katerokoli drugo tekočino.

Vodnik za odpravljanje težav

Vzrok	Mogoča rešitev
Lučki na polnilniku ne svetita	
Slušni aparat ni pravilno vstavljen v polnilni podstavek	Odstranite slušni aparat (oz. oba) in ga namestite v pravilni položaj
Polnilni podstavek se ne napaja	Preverite, ali je kabel USB pravilno priključen na hišni adapter USB S priklopom druge naprave USB preverite, ali hišni adapter USB deluje
Slušni aparat nima akumulatorske baterije	Preverite, ali je v slušnem aparatu nameščena akumulatorska baterija
Kontakti na polnilnem podstavku so nedostopni	Poskrbite, da na stikih za polnjenje ne bo umazanije
Ena ali obe lučki neprekinjeno svetita rdeče	
Baterija se ne polni	Preverite, ali je v slušnem aparatu akumulatorska baterija tipa 312

Vzrok	Mogoča rešitev
-------	----------------

Obe lučki utripata rdeče

Temperatura je zunaj razpona. Polnjenje je prekinjeno, dokler temperatura ni znova v delovnem razponu	Premaknite polnilnik na temperaturo med 10 in 40 °C
---	---

Če se katerakoli težava nadaljuje, se posvetujte s slušnim akustikom.

Tehnični podatki

Specifikacije za polnilni podstavek

Delovna temperatura	od 10 do 40 °C
Temperatura shranjevanja.....	od -10 do 50 °C
Vlažnost.....	od 20 do 75 %
Zaščita pred vdorom vode	IPX0 (navadna)
Minimalni zračni tlak.....	11 kPa
Vhodna napetost hišnega adapterja USB.....	100–240 V AC
Izhodna napetost hišnega adapterja USB	5 V DC
Izhodni tok hišnega adapterja USB	> 0,5 A
Hišni adapter USB: Kuantech KSAS0050500100-VUU (-VKU, -VEU)	
Zaščita pred električnim udarom	razred II

Informacije o simbolih in njihova razlaga



Z znakom CE podjetje Unitron potrjuje, da je ta njegov izdelek skupaj z dodatno opremo skladen z zahtevami Direktive 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih.

Številke, ki sledijo znaku CE, so oznake certifikacijskih organov, na katere se je Unitron obrnil skladno z zgoraj navedeno direktivo.



Ta simbol sporoča, da je pomembno, da uporabnik prebere in upošteva informacije, vsebovane v teh navodilih za uporabo.



Ta simbol sporoča, da je pomembno, da uporabnik upošteva opozorila, vsebovana v teh navodilih za uporabo.



Pomembne informacije o ravnanju z izdelkom in učinkoviti uporabi izdelka.



Znak za avtorske pravice.



Ob tem simbolu morata biti navedena ime in naslov pooblaščenega zastopnika v Evropski skupnosti.



Ob tem simbolu morata biti navedena ime in naslov proizvajalca, ki to napravo daje na tržišče.

Pogoji za delovanje:

Ta pripomoček je izdelan tako, da deluje brez težav in omejitev, če se uporablja na predviden način, razen če v teh navodilih za uporabo ni navedeno drugače.

Več informacij je na voljo v razdelku Tehnični podatki na strani 9.



Simbol s prečrtanim smetnjakom opozarja, da tega pripomočka ne smete odvreči kot komunalni odpadek. Stare oziroma nerabljene pripomočke oddajte centru za obdelavo odpadne elektronske opreme ali pa jih prepustite slušnemu akustiku, ki jih bo oddal naprej. Pravilna odstranitev varuje okolje in zdravje.

Dodatne opombe



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

Seznam družb iz skupine Unitron
najdete na spletni strani
www.unitron.com





unitron.com

Distributer

AUDIOBM

Info telefon: 059 044 055

Spletna stran: www.audiobm.si

Epošta: info@audiobm.si

2017-08 029-6110-14 © 2017 Unitron. All rights reserved.

sonova

