

SONIC | pep



pep

Vodnik za
uporabo



Vušesni slušni
aparati

SONIC
Everyday Sounds Better

Serijska številka slušnega aparata:

Levi _____ Desni _____

Model slušnega aparata:

Levi _____ Desni _____

Velikost baterije:**Poslušanje****Program #****Poslušanje****Zvočno okolje**

1	_____	samo ITCD in ITC
2	_____	samo ITCD in ITC
3	_____	samo ITCD in ITC

Telefonska tuljavica (opsijsko za ITCD in ITC) Desno Levo Izključeno**Vaš slušni aparat je bil prilagojen za:** Mikrofon + telefonska
tuljavica Desno Levo Samo telefonska tuljavica
tuljavica Desno Levo

Vsebina

Čestitke ob vašem nakupu!	07
Splošna opozorila in varnostne smernice	08
Pričakovanja glede sluha	12
Vaš Pep vušesni slušni aparat	14
Vklop in izklop vašega slušnega aparata	15
Namestitev vašega slušnega aparata	16
Odstranjevanje vašega slušnega aparata	17
Uravnavanje nivoja glasnosti	18
Preklapljanje programov	20
Uporaba telefonske tuljavice	21
Uporaba telefona	22
Menjava baterije	23
Pomembne informacije o baterijah	24
Vzdrževanje vašega slušnega aparata	25
Čiščenje zvočniške enote	27
Varovanje okolja	29

Odobritve za aparat, oznake in skladnosti	30
Združljivost slušnih aparatov z mobilnimi telefoni	31
Garancija in servis	32
Dodatne naprave	33
Pogoste težave in rešitve	34
Skladnost z evropskimi zahtevami	38
Servis	39



pep™

**Čestitke ob vašem nakupu!
Z malo vaje boste kmalu na dobri poti do
boljšega sluha. Ojačitev zvoka v vaših
slušnih aparatih je bila s strani vašega
slušnega akustika prilagojena potrebam
vaše izgube sluha.**

Prosimo, da pred uporabo slušnih aparatov natančno preberete ta vodnik. Vsebuje navodila in pomembne informacije o uporabi vaših slušnih aparatov in baterijah. S primerno uporabo in vzdrževanjem vam lahko vaši slušni omogočijo, da se zopet povežete z vašo okolico.

Splošna opozorila in varnostne smernice

Pred uporabo vaših slušnih aparatov se dobro pozanimajte o naslednjih splošnih opozorilih in varnostnih smernicah.

- Slušni aparati in baterije so lahko pri nepravilni uporabi škodljive. Ne poizkušajte jih zaužiti. Tovrstno ravnanje lahko privede do hudih poškodb, trajne izgube sluha ali celo smrti.
- Slušne aparate uporabljajte po nastavitvah in navodilih usposobljenega slušnega akustika. Nepravilna uporaba ali napačne nastavitve lahko privedejo do nenadne in trajne izgube sluha.
- Slušni aparati vam ne bodo povrnili vašega normalnega sluha, prav tako vam ne bodo odpravili ali preprečili nadaljnje izgube sluha.
- Nikoli ne dovolite, da drugi nosijo vaš slušni aparat. Trajno lahko poškodujejo sluh drugih oseb, saj so prilagojeni posebno za vaš sluh.
- Pri kontaktnih športih (npr., košarka, nogomet, itd.) se uporabi slušnih aparatov izogibajte, saj udarci lahko povzročijo poškodbe.
- Zavedajte se, da lahko uporaba slušnega aparata povzroči kopičenje ušesnega masla v vašem sluhovodu, kar lahko zahteva obisk zdravnika, ki vam bom očistil sluhovod.

- Vaše slušne aparate in njihove dele čistite redno in v skladu z navodili. Mikroorganizmi, ki se nabirajo na neočiščenih slušnih aparatih, lahko povzročijo draženje kože.
- V redkih primerih lahko ušesna oliva ali slušni aparat povzroči izliv ali alergijsko reakcijo. V tem primeru se nemudoma oglasite pri zdravniku.
- Ušesna oliva je izdelana po meri. V primeru, da pride do neudobja ali draženja vašega ušesa, se zglasite pri svojem slušnem akustiku, ki vam bo ušesno olivo dodatno prilagodil.
- Slušne aparate, njihove dele in baterije držite izven dosega otrok in oseb, ki bi lahko omenjene stvari zaužile ali se z njimi drugače poškodovale.
- Pri menjavi in recikliranju baterij poskrbite, da so te izven dosega otrok, duševno motenih oseb ali hišnih ljubljencev.
- Pri izlitju baterij bodite pazljivi, saj gre za nevarno substanco.
- Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki temu niso namenjene.
- Slušnega aparata ali baterij nikoli ne polagajte v usta, saj jih je zlahka zaužiti.
- Baterije hranite ločeno od zdravil, saj se jih lahko zlahka zamenja za tablete.

- V primeru, da zaužijete slušni aparat ali baterijo, se nemudoma oglasite pri zdravniku
- Bodite pozorni na možnost, da vaši slušni aparati nenadno prenehajo delovati. Tega se zavedajte, ko se nahajate v prometu ali v drugih situacijah, ki zahtevajo, da slišite varnostna zvočna opozorila.
- Nivo glasnosti prometa in ostalih varnostnih zvočnih opozoril se prav tako lahko zmanjša in sicer pri uporabi usmerjenega mikrofona, ko omenjeni zvoki izvirajo izza vas.
- Čistilnih pripomočkov nikoli ne tlačite v odprtino za mikrofona ali globoko v odprtino za zvočnik. S tem lahko vaše slušne aparate poškodujete.

**Opomba!****Opozorila za slušne akustike in uporabnike**

Pri prilagajanju in uporabi slušnega aparata z maksimalno glasnostjo, ki je večja od 132dB SPL, (IEC 711) je potrebna posebna pozornost, saj obstaja nevarnost, da si uporabnik slušnega aparata poškoduje preostali sluh.

Pričakovanja glede sluha

Zastavite si realna pričakovanja

Pomembno je, da imate glede slušnega aparata realna pričakovanja. Slušni aparati vam lahko pomagajo slišati in razumeti bolje, vendar niso zdravilo za vašo izgubo sluha.

Ljudje, ki pričakujejo preveč ("Mislil/a sem, da bom slišal/a kot v mlajših letih") so ponavadi razočarani in nad slušnimi aparati obupajo.

Slušni aparati vami lahko:

- Pomagajo, da v večini primerov slišite in razumete bolje
- Omogočajo, da se lažje udeležujete skupinskih aktivnosti in sestankov

Slušni aparati vam ne morejo:

- Vrniti vašega normalnega sluha

Slušni aparati vam morda ne bodo:

- Omogočili poslušanja izredno tihih zvokov
- Utišali VSEH motečih zvokov iz ozadja – zlasti v hrupnem okolju. Tudi ljudje brez izgube sluha imajo ob prisotnosti hrupa iz ozadja lahko težave s poslušanjem.

Bodite potrpežljivi

Za razliko od uporabe očal, ki vam v trenutku povrnejo vid, privajanje pri slušnih aparatih traja nekoliko dlje časa.

Preden se boste popolnoma privadili na vaše slušne aparate, lahko mine več tednov ali mesecev, zato bodite potrpežljivi. Sprva slušne aparate preizkusite v različnih zvočnih okoljih, kot je pogovor z eno osebo, družinskim članom ali prijateljem, nato pa tudi v pogovoru v skupini z dvema ali tremi osebami v domačem ali bolj tihem okolju.


Prav tako poskusite s pogovori v bolj hrupnih okoljih, kot so: zabave, restavracije, sestanki ali na prostem. Ne pozabite, da so nekatera zvočna okolja lahko že v osnovi prehrupna - tudi za tiste ljudi, ki nimajo izgube sluha.

To naj vas to ne odvrne od uporabe slušnih aparatov.


Redna uporaba slušnih aparatov je pomembna in priporočena. Zelo verjetno je, da pri neredni uporabi, ne boste dosegli polne koristi, ki vam jo nudi vaši slušni aparati.

Uporaba slušnega aparata je le del celotne rehabilitacije sluha. V nekaterih primerih rehabilitacija sluha zahteva dodatne aktivnosti, kot so vaje poslušanja in branja z ustnic.


Vaš Pep vušesni slušni aparat

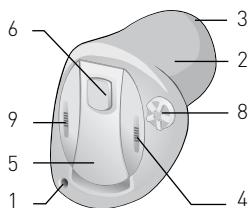

ITCD

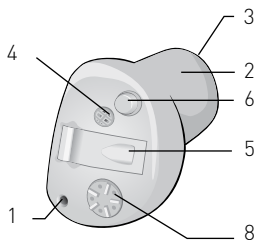

ITC

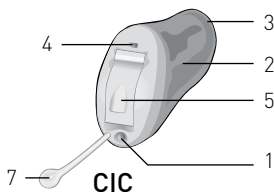

CIC

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Prezračevalna odprtina | 6 | Večnamenska tipka (opcijsko) |
| 2 | Sluhovodni del | 7 | Držalo za odstranjevanje |
| 3 | Zvočniška enota z zaščito proti ušesnem maslu | 8 | Tipka za uravnavanje nivoja glasnosti (opcijsko) |
| 4 | Odprtina za mikrofona | 9 | Druga odprtina za mikrofona |
| 5 | Predalček za baterijo | | |


Vklop/Izklop vašega slušnega aparata

Za vklop vašega slušnega aparata

Zaprte predalček za baterijo tako, da zaslišite klik. Slušni aparat bo ob vklopu predvajal dolg opozorilni pisk.

Za izklop vašega slušnega aparata

Položite svoj noht pod rob predalčka za baterijo in ga dvignite.

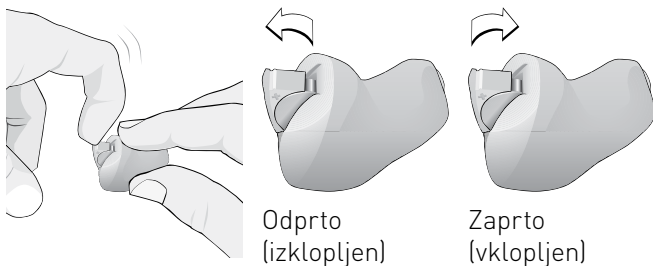

Opomba!


Predalčka za baterijo nikoli ne odpirajte ali zapirajte s silo.

Nameščanje vašega slušnega aparata


Za pravilno vstavljanje slušnega aparata boste potrebovali potrpljenje in vajo. V primeru, da imate težave, se posvetujte s slušnim akustikom.

- Slušni aparat pridržite s palcem in kazalcem vaše roke.
- Desni slušni aparat vstavljajte z desno roko, levi slušni aparat pa z levo roko.
- Potisnite sluhovodni del vašega slušnega aparata v vaš sluhovod (Slika 1).
- Med vstavljanjem aparata z drugo roko nežno potegnite uhelj navzdol dokler ne občutite, da je slušni aparat varno in udobno nameščen (Slika 2).

Slika 1

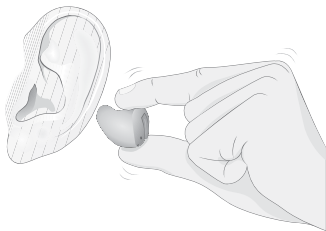

Slika 2

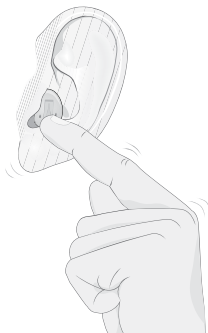

Odstanjanje vašega slušnega aparata:

- Uporabite vaš palec za potisk spodnjega dela vašega uhlja, da bi sprostili sluhovod.
- Slušni aparat primite za robove z vašim palcem in kazalcem in ga nežno odstranite iz ušesa.
- V primeru, da ima vaš slušni aparat držalo za odstanjevanje, ga nežno potegnite.



Pomembno!

Slušnih aparatov ne odstranjajte tako, da vlečete za predlaček za baterijo. To lahko povzroči poškodbe. V primeru, da imate težave z vstavljanjem vašega slušnega aparata, obiščite vašega slušnega akustika.

Nastavljanje nivoja glasnosti

Glasnost vaših slušnih aparatov je prilagojena na udoben nivo za vašo izgubo sluha. Slušni aparati so zasnovani tako, da se samodejno prilagajajo na spremembe zvoka okolice v kateri se nahajate.

Nekateri modeli slušnih aparatov vam omogočajo prilagajanje nivoja glasnosti prek opsijske tipke za uravnavanje nivoja glasnosti ali daljinskega upravljalnika.

Kolešček za uravnavanje nivoja glasnosti

Kolešček za uravnavanje nivoja glasnosti je na voljo za vse ITCD in ITC slušne aparate.

Za povečanje nivoja glasnosti

Tipko za uravnavanje nivoja glasnosti obrnite naprej. V primeru, da dosežete najvišji nivo glasnosti, bo slušni aparat nekajkrat zapiskal.



Za zmanjšanje nivoja glasnosti

Tipko za uravnavanje glasnosti obrnite nazaj. V primeru, da dosežete najnižji nivo glasnosti, bo slušni aparat nekajkrat zapiskal.

Tipka za uravnavanje nivoja glasnosti ne vsebuje mehanske blokade. Lahko jo obračate v krogih, vendar bo nivo glasnosti ostal med prilagojenim najnižjim in najvišjim nivojem. Vaš slušni akustik vam nivo glasnosti lahko spremeni ali pa ga po vaši želji nastavi na fiksno glasnost.



Opomba!

Vaši slušni aparati se ob vklopu, slabi bateriji ali ob spremembi programa, samodejno vrnejo na privzet nivo glasnosti. V primeru, da si nivo glasnosti pogosto prilagajate, obiščite vašega slušnega akustika, ki vam bo nivo glasnosti zopet prilagodil.

Preklapljanje programov (Opcijsko za ITCD in ITC aparate)

Vaš slušni aparat ima lahko nameščenih več slušnih programov. Prosimo pogledajte na prvo stran tega vodnika, da bi izvedeli, katere programe vam je namestil vaš slušni akustik. Med programi lahko preklapljate na naslednji načine:

Tipka

V primeru, da ima vaš slušni aparat večnamensko tipko, vam jo lahko vaš slušni akustik prilagodi za preklapljanje programov. Pritisk tipke bo povzročil preklon na naslednji slušni program. To bo trajalo 1 – 2 sekundi, dokler ne zaslišite spremembe programa. Število piskov vam pove v katerem programu se nahajate.

Uporaba telefonske tuljavice (Opcijsko za ITCD in ITC aparatov)

Telefonska tuljavica vam omogoča boljše poslušanje med telefoniranjem in v zgradbah, ki imajo vgrajeno indukcijsko zanko (cerkev, dvorane, teatri, itd.).

Ko je aktivirana telefonska tuljavica, lahko poslušate direkten zvok telefona ali indukcijske zanke. Za vklop telefonske tuljavice, preklopite na program za telefonsko tuljavico. Prosimo, glejte prvo stran tega vodnika, da bi izvedeli kateri izmed vaših programov, je namenjen telefonski tuljavici.



Tak ali podoben simbol označuje, da je v prostoru vgrajena indukcijska zanka.



Opomba!

Vsi telefoni niso kompatibilni s telefonsko tuljavico, ki je vgrajena v slušni aparat.


Uporaba telefona

Vaš slušni akustik vam lahko nastavi program za telefoniranje. Do njega lahko pridete s pritiskom na večnamensko tipko. Prosimo, glejte prvo stran tega vodnika, da bi izvedeli, kako so prilagojeni vaši slušni aparati.

Menjava baterije

V primeru slabe baterije bo vaš slušni aparat piskal v enakomernih presledkih. Baterijo je treba nemudoma zamenjati. Čas, v katerem se slušni aparat ob slabi bateriji izklopi, je odvisen od tipa in proizvajalca baterije. Baterije brez živega srebra običajno sprožijo opozorilne piske nekoliko prej.


- Nežno odprite predalček za baterijo.
- Prazno baterijo odstranite (Slika 1).
- Pred vstavitvijo nove baterije v slušni aparat, z nje odstranite nalepko (Slika 2).
- Baterijo v predalček položite tako, da bo gladka stran baterije na vrhu (oznaka +) kot je prikazano na sliki (Slika 3).
- Povsem zaprite predalček za baterijo.

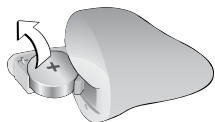

Slika 1



Slika 2

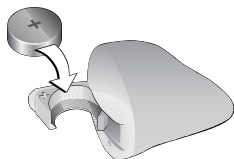

Slika 3

Pomembne informacije o baterijah

- Življenjska doba baterije lahko niha glede na okolje v katerem uporabljate vaš slušni aparat (baterija se hitreje prazni v hrupnem okolju).
- Pri sebi imejte vedno nadomestne baterije.
- Prazno baterijo je potrebno nemudoma zamenjati.
- V primeru, da slušnih aparatov nekaj dni ne uporabljate, odstranite baterije.
- V primeru, da je bil slušni aparat izpostavljen vlagi, ga nemudoma obrišite z mehko krpo.
- Pred sušenjem slušnega aparata s sušilno napravo, vedno odstranite cink zrak baterije. Sušenje cink zrak baterij skrajša njihovo življenjsko dobo.
- Za varno recikliranje prazne baterije vrnite vašemu dobavitelju ali vašemu slušnemu akustiku.
- Baterij nikoli ne izpostavljajte ognju. Te lahko eksplodirajo in povzročijo poškodbe.
- Baterij nikoli ne odlagajte v gospodinjske odpadke. Baterije lahko škodujejo okolju.
- Baterij ne poskušajte zaužiti. Baterije držite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev. V primeru zaužitja baterije, nemudoma obiščite zdravnika.

Vzdrževanje vaših slušnih aparatov

Zdrava ušesa proizvajajo cerumen, voskasto substanco, ki lahko zamaši vaše slušne aparate. Prosimo, da sledite navodilom za čiščenje, da bi preprečili nabiranje cerumna in zagotovili optimalno delovanje.

Vsak večer

- Vaše slušne aparate opazujte in z njih s krpo ali robcem obrišite ušesno maslo.
- Uporabite čistilni pripomoček za odstranjevanje cerumna, ki se je morda nabral na zvočniški enoti ali prezračevalni odprtini.
- Povsem odprite predalček za baterijo, da lahko kroži zrak.
- Priporočena je uporaba naprave za sušenje slušnih aparatov, s katero lahko odstranite vlago, ki se je nabrala v ali na slušnih aparatih.

Aparat držite stran od vročine, vlage in kemikalij


- Slušnih aparatov nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam – avto, radiator, itd.
- Slušnih aparatov nikoli ne izpostavljajte vodi ali vlagi, npr. parnim kopelim, tušem, močnemu dežju, ipd.
- Slušnega aparata nikoli ne poizkušajte sušiti s sušilcem za lase, mikrovalovno pečico, ipd.

- Pred uporabo toaletne vode, laka za lase, olja, parfuma, pršila za komarje, losjona ipd., slušne aparate odstranite. Predenj si namestite slušne aparate, počakajte, da se omenjene substance posušijo.
- Ko slušnih aparatov ne uporabljajte, jih zavarujte tako, da jih pospravite v etui.
- V primeru, da zaradi večje količine ušesnega masla, draženja kože ali drugih razlogov, ne morete uporabljati slušnega aparata, se posvetujte z zdravnikom.

Čiščenje zvočniške enote

Zvočniška enota je pomemben del vaših slušnih aparatov, zato ga je treba redno vzdrževati in z njega očistiti ušesno malo.

- Pred uporabo slušnih aparatov vedno preglejte NoWax filter in se prepričajte, da ta morda ni odpadel.
- Zamenjajte filter, če je ta zamašen ali če opazite nenavaden zvok slušnih aparatov.
- Uporabite namensko orodje in ročko za odstranjevanje potisnite v star filter, ter ga odstranite iz zvočniške enote.
- Ročko z novim filtrom potisnite v zvočniško enoto.
- Star filter in orodje za odstranjevanje filtra zavržite.

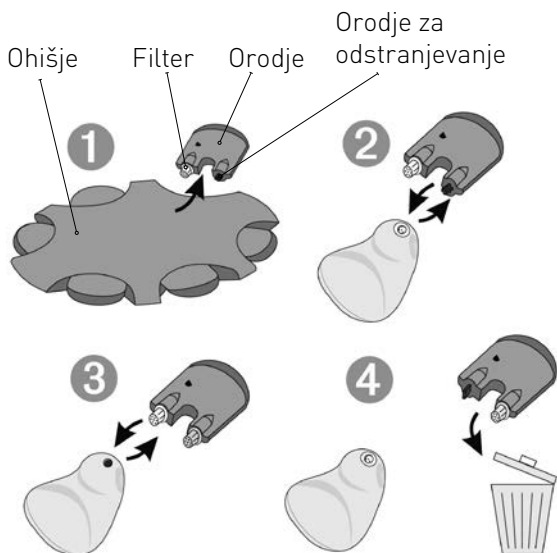**Opomba!**

V primeru, da imate pri čiščenju slušnih aparatov težave, se oglasite pri vašem slušnem akustiku.

Varovanje okolja

Vaš slušni aparat vsebuje elektronske komponente, ki so v skladu z Direktivo 2002/96/EC o recikliranju električnih in elektronskih naprav (WEEE).

Da bi zaščitili okolje, slušnih aparatov ali baterij ne zavržite v gospodinjske odpadke. Prosim, da vaše slušne aparate in baterije reciklirate v skladu z lokalnimi pravili ali jih vrnite vašemu slušnemu akustiku.



Odobritve za aparat, oznake in skladnost

Vsi Sonic slušni aparati so v skladu z mednarodnimi standardi elektromagnetne združljivosti. Zaradi majhne površine slušnih aparatov, se pomembni simboli nahajajo v tem vodniku.

Elektromagnetne motnje

Vaš slušni aparat je bil za elektromagnetne motnje natančno preverjen. Kljub temu lahko nekatere naprave oddajajo elektromagnetno energijo, ki povzroča nepredvidene motnje v slušnih aparatih. Gre za naprave, kot so: kuhinjski aparati, trgovinski alarmi, mobilni telefoni, fax naprave, osebni računalniki, rentgeni, ipd.

Združljivost slušnih aparatov z mobilnimi telefoni

Nekateri uporabniki slušnih aparatov se pritožujejo nad brnenjem njihove naprave, ko uporabljajo mobilni telefon, kar lahko pomeni, da njihov mobilni telefon ni združljiv z njihovim slušnim aparatom.

Združljivost posameznega slušnega aparata in mobilnega telefona lahko predvidimo z oceno odpornosti slušnega aparata in oceno emisij mobilnega telefona (ANSI C63. 19-2006 Ameriški državni inštitut za standarde – merjenje združljivosti brezžičnih komunikacijskih naprav in slušnih aparatov).

Za primer, bi bil seštevek ocene slušnega aparata 2 (M2/T2) in ocene mobilnega telefona 3 (M3/T3), skupna ocena 5. V skladu s standardi, je vsaka skupna ocena enaka številu 5 obravnavana, kot "normalna uporaba"; Skupna ocena 6 ali več bi predstavljala "odlično delovanje". Odpornost vašega Pep slušnega aparata je vsaj M2/T2.

Merjenje delovanje opreme, kategoriziranje in sistemska klasifikacija temeljijo na najboljših informacijah, vendar Sonic ne garantira, da bodo zadovoljni vsi uporabniki.

Garancija in servis

Vaš slušni aparat ima morda omejeno garancijo, ki krije napake in popravila. Garancija pokriva slušne aparate, ne pokriva pa baterij, cevok, kupol, ušesnih oliv, ipd.

Garancija ne velja, če pride do poškodb zaradi malomarnosti ali nepravilne uporabe. Garancija prav tako ne velja, če je slušni aparat servisiral nepooblaščen serviser. Vsako leto je potrebno opraviti redni letni kontrolni pregled.

Prosimo, da se o garanciji pozanimate pri vašem slušnem akustiku in preverite ali je vaša garancija izpolnjena pravilno.



Opomba!

Vaš slušni akustik vam bo v nekaterih primerih popravilo zaračunal – podrobnosti so navedene v garancijskem listu.

Dodatki

Dobavitelj slušnih aparatov Sonic nudi širok izbor dodatnih naprav, katere si lahko priskrbite za izboljšanje vašega slušnega sistema. V odvisnosti od tipa vašega slušnega aparata in lokalnih predpisov, so na voljo naslednje dodatne naprave:

- Pribor za čiščenje in sušenje.

Za dodatne informacije o dodatnih napravah, obiščite vašega slušnega akustika.

Pogoste težave in rešitve

Težava	Verjeten razlog
Aparat žvižga ali piska	Aparat ni nameščen pravilno V sluhovodu se je nakopičilo ušesno maslo Aparat ni dovolj pričvrščen
Ni zvoka, nivo glasnosti prenizek ali brenčanje	Slušni aparat morda ni vklopljen Baterija je morda prazna ali napačno vstavljena Nivo glasnosti je prenizek Slušni aparat je morda nastavljen na program za telefonsko tuljavico V sluhovodu se je nakopičilo ušesno maslo Kontakti baterije so morda umazani ali zarjaveli Zvočniška enota je morda zamašena ali zarjavela Odprtina za mikrofon je morda zamašena Vaš sluh se je morda poslabšal

Rešitev

Ponovno vstavite aparat

Obiščite vašega slušnega akustika ali zdravnika

Obiščite vašega slušnega akustika

Preverite ali je predalček za baterijo povsem zaprt

Vstavite novo baterijo

Povišajte nivo glasnosti s tipko (če je ta na voljo)

Preverite ali uporabljate željen program

Obiščite vašega slušnega akustika ali zdravnika

Nekajkrat odprite in zaprite predalček za baterijo ali očistite kontakte baterije

Preverite zvočniško enoto in zamenjajte filter, če opazite, da je ta zamašen

Obiščite vašega slušnega akustika in tega ne poizkušajte očistiti sami

Obiščite vašega slušnega akustika

Težava

Žvižganje,
upadajoči
ali slabi zvoki

Verjeten razlog

Baterijski kontakti so morda
umazani ali zarjaveli

Vlaga v slušnem aparatu

Slaba baterija

Slušni aparat se
periodično vklaplja
in izklaplja

Slaba baterija

Rešitev

Nekajkrat odprite in zaprite predalček za baterijo ali očistite baterijske kontakte

Slušni aparat postavite v napravo za sušenje. Sprva odstranite baterijo. Obiščite vašega slušnega akustika.

Vstavite novo baterijo

Vstavite novo baterijo

Skladnost z evropskimi predpisi

Ta naprava je v skladu z zahtevami odloka 93/42/EEC sveta evropske skupnosti glede medicinskih naprav, MDD. To je zaznamovano s to oznako.



Deklaracije o skladnosti so na voljo:
Sonic Innovations, Inc.
2501 Cottontail Lane
Somerset, NJ 08873

Servis

V primeru, da vam napotki in nasveti tega vodnika o uporabi slušnih aparatov niso pomagali odgovoriti na vprašanja ali rešila težav, se obrnite na vašega dobavitelja Sonic naprav.

Na napravi servisa ne izvajajte sami, saj boste tako izgubili garancijo.

Vaš dobavitelj:

AUDIO BM d.o.o.

Letališka cesta 5

1000 Ljubljana

Telefon: 059 044 055

Spletna stran: www.audiobm.si

Beleške

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

World Headquarters

Sonic Innovations, Inc.

2501 Cottontail Lane

Somerset, NJ 08873 USA

+1 888 423 7834

International

Sonic AG

Morgenstrasse 131B

3018 Bern, Switzerland

+41 31 560 21 21

10.15 | 165583 | SI



www.sonici.com



000016558300001

 **SONIC**
Everyday Sounds Better