



Simbol strele pomeni, da je notranjost naprave pod visoko napetostjo.

POZOR:

DA BI PREPREČILI NEVARNOST ELEKTRICNEGA UDARA NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN V NJO NE POSEGAJTE. V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVILI. SERVIS OPRAVLJAJTE PRI DOBAVITELJU.



Simbol klicaja pomeni, da berete zelo pomemben del teh navodil za to napravo.

POZOR: DA BI PREPREČILI NEVARNOST POŽARA ALI ELEKTRICNEGA UDARA, NAPRAVE NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU ALI VLAGI.

Dobavitelj za Slovenijo:

AUDIOBM

Info telefon: 059 044 055

E-mail: info@audiobm.si

Spletna stran: www.audiobm.si



Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.



Sonic Alert

America's Leader in Visual Alerting Systems.

Sonic Boom Digitalna Budilka Z Dvojnimi Alarmom In Vibratorjem




AUDIOBM

BUDILKA Z DVOJNIM ALARMOM, NASTAVLJIVIM TONOM, GLASNOSTJO IN VIBRATORJEM

NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNO - Prosimo, da pred prvo uporabo natančno preberete ta navodila in jih shranite na varno mesto za kasnejšo rabo.

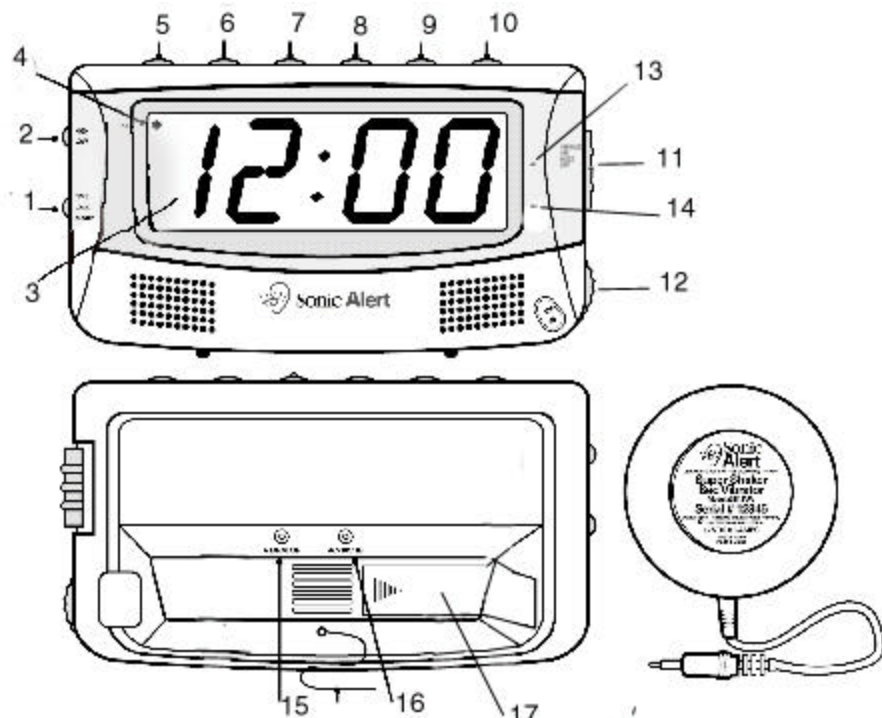

OPIS DELOV NAPRAVE IZ ZGORNJE SLIKE

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Stikalo za dvojni alarm | 10) Koleček za nastavev tona |
| 2) Stikalo za zatemnitev zaslona | 11) Stikalo za izbiro funkcij |
| 3) Zaslon za prikaz časa | 12) Koleček za nastavev glasnosti |
| 4) PM indikator (samo 12 urni način) | 13) Alarm 1 (AL1) indikator |
| 5) Nastavev alarma ON/OFF | 14) Alarm 2 (AL2) indikator |
| 6) Gumb Fast Min/Hour | 15) Vhod za vibrator |
| 7) Gumb Slow Min/Hour | 16) AC napajalni vhod |
| 8) Gumb za dremež | 17) Prostor za baterijo |
| 9) Stikalo za nastavljanje časa | |

SPLOŠNE LASTNOSTI

Poraba energije: ZDA: AC 110V / 60Hz EVROPA: AC 230V / 50 Hz.

Nastavev točnega časa:

- 1) Pritisnite gumb "TIME SET" (9)
- 2) Med tem ko držite gumb "TIME" (9) hkrati pritisnite tudi gumb "FAST" (6) ali "SLOW" (7) minute/ure za nastavev željenega časa.
- 3) Osvetljena lučka (4), ki se nahaja v zgornjem levem delu zaslona pomeni, da gre za popoldanski čas PM, ko lučka ne sveti pa gre za dopoldanski čas AM. (Samo v 12 urnem prikazu)

Nastavev časa alarma:

- 1) Za nastavev alarma AL1 potisnite stikalo "DUAL ALARM SETTING" (1) na AL1.
- 2) Pritisnite gumb "ALARM SET/OFF" (5) in hkrati pritisnite gumba "FAST" (6) ali "SLOW" (7) minute/ure dokler ne nastavite željenega časa za alarm.
OPOMBA: v primeru, da med nastavljanjem alarma prekoračite 24. uro bo začel piskati alarm, utripal pa bo tudi zaslon (3). Da bi prekinili utripanje zaslon premaknite "FUNCTION SWITCH" (11) na OFF položaj. Med zvonjenjem alarma utripa tudi zaslon (3).
- 3) V 12 urnem načinu poskrbite, da je alarm pravilno nastavljen za AM ali PM (4).
- 4) Po nastavljanju alarma AL1, pomaknite "DUAL SETTING SWITCH" (1) na položaj AL2 in sledite istim korakom kot pri nastavljanju alarma AL1.
- 5) Po tem, ko sta nastavljeni oba alarma AL1 in AL2, pomaknite stikalo "DUAL SETTING SWITCH" na sredinjski položaj AL1+AL2 za uporabo obeh alarmov.
- 6) Opazili bosta dve rdeči piki na desni strani LED zaslona, kar pomeni, da sta oba alarma AL1 (13) in AL2 (14) aktivirana. Lučke prikazujejo aktiviran alarm.

Alarm:

- 1) Za aktivacijo alarma pomaknite "FUNCTION SWITCH" (11) na željen položaj za način bujenja. Lahko izbere "VIB" za vibriranje, "BUZZ" za zvonjenje in "VIB/BUZZ" za oba načina.
OPOMBA: izbran način bujenja bo veljal za oba alarma.

Nastavev dremeža:

- 1) "SNOOZE" gumb (8) – pritisnite med zvonjenjem alarma. Alarm se bo nastavljal tako, da bo zopet zvonil čez 9 min. Postopek lahko ponavljate naslednjih 54 minut.
- 2) Med uporabo gumba "SNOOZE" (8) bo dremež veljal le za AL1 in ne bo vplival na alarm AL2.

Izklop alarma:

Alarm lahko izklopite le za en dan ali trajno.

- 1) Ko se sproži alarm AL1, pritisnite gumb "ALARM SET/OFF" (5) za izklop alarma tisti dan.
- 2) Ko se sproži oba alarma in pritisnete gumb "ALARM SET/OFF" (5) se bosta alarma izklopila za tisti dan in ponovno zvonila naslednji dan, z izjemo, če so bile spremenjene nastavitve.
- 3) Za trajen izklop alarma pomaknite "FUNCTION SWITCH" (11) navzdol na položaj OFF. Alarm se ne bo vklopil dokler ne pomaknete stikala "FUNCTION SWITCH" (11) na položaj "VIB/BUZZ", "VIB", ali "BUZZ".

Nastavev glasnosti:

- 1) Za nastavev glasnosti, pomaknite koleček, ki se nahaja v spodnjem desnem kotu budilke

Nastavev tona:

- 1) Za nastavev tona pomaknite koleček "TONE CONTROL" (10), ki se nahaja v zgornjem desnem kotu budilke.

Vibrator:

- 1) Vibrator vklopite v ustrezen vhod "VIBRATOR INPUT" (15) na zadnji strani budilke.
- 2) Za vklop vibratorja pomaknite "FUNCTION SWITCH" (11) na "VIB" ali "VIB/BUZZ".
- 3) Vibrator položite pod žimnico.

Baterija:

1) Za uporabo zasilne baterije vstavite 9-voltno alkalno baterijo na zadnji strani budilke "BACKUP BATTERY COMPARTMENT COVER" (17). Baterija ni vključena v komplet.

AC 9V

Napajalni adapter

- 1) Priklopite "AC POWER INPUT" (16) v vhod AC-9V IN, ki se nahaja na zadnji strani budilke poleg vhoda "VIBRATOR INPUT" (15).

Izbira časovnega formata:

Stikalo za izbiro časovnega formata se nahaja na zadnji strani budilke in ima 3 možne položaje. Izbira časovnega formata je pomembna, saj budilka le tako prikaže točen čas.

OPOMBA:

POMEMBNO: ne zamenjajte vhoda "AC POWER INPUT" (16) z vhodom "VIBRATOR INPUT" (15).